

機械器具(80)はり又はきゅう用器具
 一般医療機器 非侵襲式家庭向け鍼用器具 JMDNコード 341675001


よもぎ粒鍼 PointKey

【禁忌・禁止】

原材料に含まれる物質に対して、過去に過敏症やアレルギー反応を起こしたことがある方は、使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

<各部の名称>

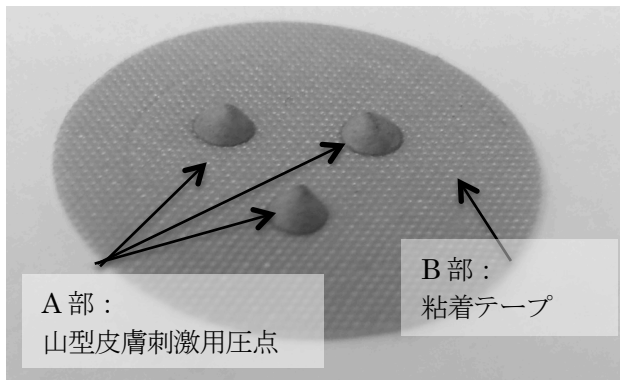

<各部の機能>

A部：皮膚に固定され経穴等の末梢神経を刺激すること。

B部：皮膚刺激用圧点を皮膚に固定する。

<原理>

本品は、皮膚に固定され、経穴等の末梢神経を刺激することによって、各種の治療効果を促進する。

【使用目的、効能又は効果】

家庭ではり治療に使用すること

【原材料又は構成部品】

A部：山型皮膚刺激用圧点（3点・1点）

原材料：松脂、ヨモギ濃縮液、ジェイド(玉)パウダー、トルマリン、乳香、ゲルマニウム、センキュウ、イレイセン、ビャクシ、バイオセラミックス、甘草、龍腦、薄荷

B部：医療用粘着テープ

【品目仕様等】

【3点型】

	寸法(mm)	許容差(mm)
山型圧点	直径 3 mm 高さ 2 mm	±0.5mm ±0.5mm
粘着テープ	直径 2 1 mm	±1mm

【1点型】

	寸法(mm)	許容差(mm)

山型圧点	直径 2mm 高さ 1.5mm	±0.5mm ±0.5mm
粘着テープ	直径 12mm	±1mm

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 本品を貼付する箇所の皮膚を清潔にする。
- 2) 本品を剥離紙からはがす。
- 3) 経穴等の皮膚上に貼付する。
- 4) 使用後は、皮膚から剥がす。

【使用上の注意】

- 自分の意志で取り外すことのできない方は、使用しないでください。
- 顔面、粘膜、傷口には使用しないでください。
- 貼付する際、皮膚の汚れや汗を拭き取り、皮膚を消毒してから貼付してください。
- 皮膚の敏感な部位、炎症のある部位への使用は控えてください。
- かゆみやかぶれが生じた場合は、直ちに取り外してください。
- 汗をかきやすい環境での使用は控えてください。
- 肌に合わない場合は、使用を中止してください。
- 重度の糖尿病の方は、原則として使用しないでください。使用する場合は、医師、鍼灸師に相談の上使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（貯蔵・保管方法）

- 水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。
- 幼児の手の届かない所に保管すること。

【包装】

60個入／箱 または 150個入／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：有限会社ヤンイー貿易

住所：

〒655-0893 兵庫県神戸市垂水区日向2丁目6番29

電話番号：078-742-7068

製造業者：HAITNIM CO.,LTD

住所：206-3 Naengjeong-ri, Seonwon-myeon, Ganghwa-gun, Incheon-shi, Korea